




TELEMEDHUB
telemedhub.io



Мониторинг артериального давления

В домашних условиях

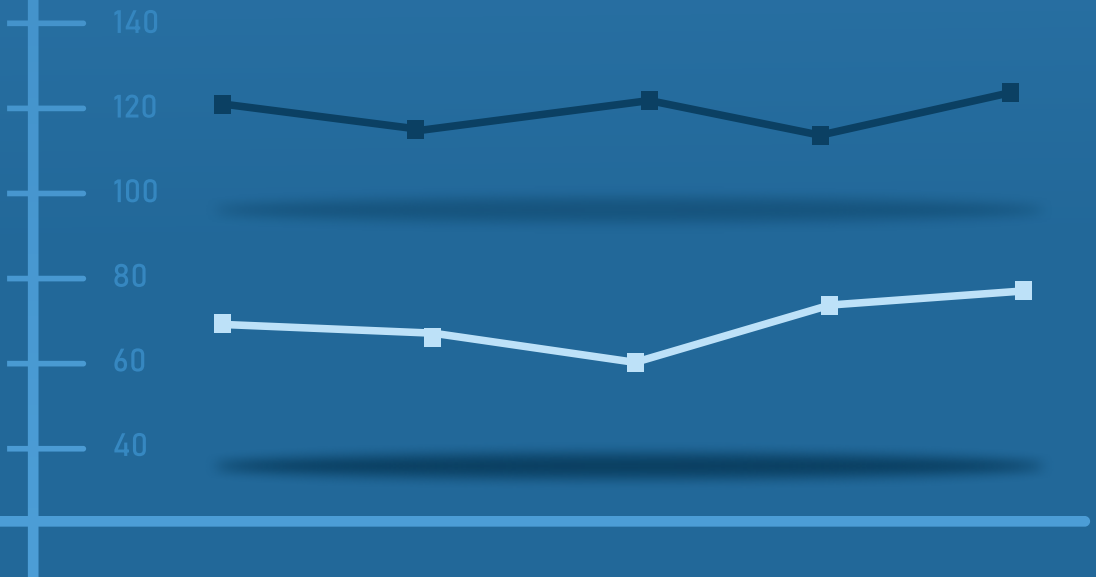

Врач принял решение, что Вам необходим мониторинг артериального давления в домашних условиях



Вам выдан набор в пластиковом кейсе, который включает в себя:

- 1 ТелеМедХаб
- 2 Тонометр
- 3 Манжета для тонометра
- 4 Зарядное устройство к ТелеМедХабу
- 5 Адаптер питания для тонометра

Что такое дистанционный мониторинг?



Дистанционный мониторинг здоровья - это динамическое регулярное наблюдение за пациентом, направленное на своевременное выявление ухудшения его состояния и организацию медицинской помощи для коррекции тактики лечения.

Данное наблюдение, в отличие от стационарного, осуществляется посредством применения медицинских устройств с функцией передачи данных и платформы для отображения собранных данных.

Врач удаленно в непрерывном режиме будет иметь возможность увидеть данные измерений пациента, представленные в виде наглядных графиков и диаграмм.

При необходимости врач может связаться с пациентом и дать рекомендации по поведению или по проводимой терапии.

Преимущества удаленного мониторинга:



Полнота медицинских данных – врач видит все Ваши измерения, а не только то, которое было произведено на очном приеме;



Анализ данных – при динамическом наблюдении и доступа к нескольким измерениям можно заметить важные особенности, которые нельзя увидеть при однократном измерении;




Связь с врачом – постоянная связь с лечащим врачом в процессе наблюдения;



Простота использования – возможность использования дистанционного мониторинга разными группами пациентов, в том числе пожилыми и не имеющими опыта работы с техникой.

На повторный прием к врачу необходимо принести с собой кейс в полном составе.

ТелеМедХаб уже предварительно настроен и готов к работе. Для начала работы выполните следующие действия

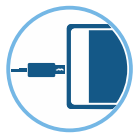

Подключите ТелеМедХаб к блоку питания



Включите устройство долгим нажатием кнопки справа

По окончании загрузки устройства вы увидите следующую картинку



На ТелеМедХабе установлена сим-карта с доступом к сети интернет, через который будет передаваться полученная информация в защищенном режиме вашему доктору



Установите ТелеМедХаб вблизи (не более 10 метров) от места, где будете выполнять измерение артериального давления

На протяжении всего времени работы ТелеМедХаб должен быть подключен к электросети. Слегка приглушенный экран ТелеМедХаба – это нормальное состояние прибора.

Измерение артериального давления



Займите удобное положение сидя, спина должна быть с упором на спинку, рука – на подлокотнике

Перед измерением посидите несколько минут, это нужно для точного определения артериального давления



Наденьте манжету тонометра на плечевую часть руки на расстоянии 2-3 см выше локтевого сгиба. Не закатывайте рукава одежды и не выполняйте измерения в одежде из плотной ткани



Плотно закрепите манжету. Убедитесь, что трубка нагнетания воздуха находится над локтевой ямкой



Нажмите на большую кнопку на тонометре. Начнется измерение



Во время измерения не разговаривайте и старайтесь не двигаться




После измерения можно снять манжету. Вы увидите Ваше показания Вашего артериального давления на экране, после чего через несколько секунд эти показания будут переданы в ТелеМедХаб



Не спешите отключать тонометр, он передаст данные и выключится сам через некоторое время.

По окончании периода мониторинга соберите все устройства в кейс. Кейс возьмите с собой на повторный прием к врачу

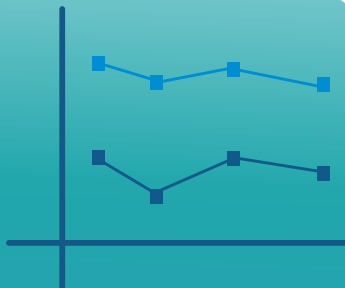



TELEMEDHUB
telemedhub.io

Контакты:



support@telemedhub.io

